

“플렉시풋 스틱” 사용 설명서

제품 구조 및 사양

1) 접이식 스틱 (FS302)

83.7cm~93.7cm사이에서 조절,

-FS302(BLACK)

부드러운 재질의 타원형손잡이
블랙스틱, 블랙/오렌지 플렉시풋

-FS302(BLUE)

부드러운 재질의 타원형손잡이
일렉트릭블루, 블랙/오렌지 플렉시풋



FS302

2) 조절식 스틱 (FS301)

70cm~90cm사이에서 조절,

-FS301(BLACK)

부드러운 재질의 타원형손잡이
블랙스틱, 블랙/오렌지플렉시풋

-FS301(BLUE)

부드러운 재질의 타원형손잡이
일렉트릭블루스틱, 블랙/오렌지플렉시풋



FS301

FS301

3) 스포츠/하이킹폴 (FS305)

71cm~96.5cm에서 조절

-FS305

검용잡이식 코르크손잡이
블랙스틱, 블랙/오렌지플렉시풋

-FS305

검용잡이식 코르크손잡이
일렉트릭블루스틱, 블랙/오렌지플렉시풋



FS305

FS305

* 참조사항

- 스포츠/하이킹폴은 일반지팡이나 등산용 스틱과는 다른 제품입니다.
도시 및 교외산책, 비교적 완만한 걷기코스 등 가벼운 하이킹 코스에서 사용하시고 급한경사나 험지에서의 사용은 피해주시오.
용도에 맞는 제품을 선택해 주십시오.
- 또한 빙판길이나 눈길에서는 접지부에 메탈스파이크를 장착한 ‘플렉시풋부츠<아이젠>’ (FF201)을 끼워 사용하시면 도움이 될 수 있습니다.

** ‘플렉시풋’ (고무발)의 사용 방법에 대해서는 별도 사용설명서를 참조하시기바랍니다

*** 올바른 지팡이 길이 선택방법:

지팡이의 지면에 닿는 끝 부분을 같은 쪽 발끝의 앞 바깥 방향 20cm에 두고
이때 팔꿈치의 굽혀진 정도가 30~40도 정도 되도록 지팡이의 길이를 조절하여 사용해 주시기 바랍니다.



FF201

도시의 멋진 실버, 편안하고 안전한 스틱!
액티브실버를 위한 패션스틱, 플렉시풋스틱!

flexyf^{oot}
탄력있는 발걸음 “플렉시풋” !

스틱(지팡이) 및 하이킹폴 길이 조절방법

조절식스틱(지팡이):

1. 먼저 흔들림고정쇠를 풀어줍니다.
2. 사용자의 높이에 맞추어 조절 버튼을 눌러 단계별로 조절합니다.
이때 조절 버튼이 ‘탁’ 소리가 나며조절구멍으로 튀어나옵니다.
3. 흔들림 고정쇠를 다시 단단히 고정합니다.

접이식스틱(지팡이):

1. 접이식은 홈에 맞추어 일자형으로 만들어 주세요.
2. 사용자의 높이에 맞추어 조절 버튼을 눌러 단계별로 조절합니다.
이때 조절 버튼이 ‘탁’ 소리가 나며조절구멍으로 튀어나옵니다.

스포츠/하이킹폴:

1. 먼저 아래쪽 스틱부분을 시계반대방향으로 풀어 길이 조절이 가능한 상태로 만듭니다.
2. 적당한 길이로 조절한다음 다시아래쪽 스틱부분을 시계방향으로 돌려 단단히 잠급니다.

높이 조절 후에는 한번 가볍게 땅에 두드려 이상이 없는지 확인합니다.

사용상 주의사항

1. 용도에 맞는 스틱(지팡이)이나 폴을 선택하고 신체에 맞게 높이 조절하여 사용하십시오.
2. 사용전에 제품의 각 부분을 점검한 후 사용하십시오.
3. 높이 조절 후에는 완전하게 고정되었는지 확인해 주십시오.
4. 미끄러지기 쉬운 곳이나 험지에서는 특히 사용에 주의하여 주십시오.
5. 용도외에는 사용하지 마십시오.(호신용, 등산용 등)
6. 접지고무가 마모되거나 손상되었을 경우는 즉시 교체하여 주십시오.
7. 스틱(지팡이) 지대가 확실히 고정되었는지, 헐거움이 없는지 확인 후 사용하십시오
7. 접이식의 경우 내부 고무로프의 열화, 느슨함, 손상이 있는지 자주 확인하여 주시고
고온의 장소에 너무오래 두지 마십시오. 로프고무의 열화 원인이됩니다.
또 저온에서는 (한랭지 등) 접은 상태에서 바로 고무로프의 탄성이 바로 회복되지 않는 경우가 있으니
주의하십시오. 그 외의 사용 후 및 보관방법에 주의하시고 이상이 있을시는 판매점에 문의하십시오.
8. 제품을 사람이나 가축 등을 향하여 휘두르지마십시오.
9. 지면의 작은 틈새 등에 끼임에 주의하십시오.

제품 구입 및 AS 문의: 전화 031-709-3622로 문의하여 주십시오.

AS 규정

1. 보증기간(구입일로부터 1년)내에는 무료로 AS하여 드리며 기간 이후에는 유료로 AS하실 수 있습니다.
2. 유상 AS의 경우 수리비, 부품비, 기타 실비용이 청구 될 수 있습니다.
3. 보증기간내의 경우에도 소비자 과실에 의한 손상이나 고장의 경우는 유상처리됩니다.

공산품품질관리법에의한 품질표시 (FS301, FS302제품)

1. 제품명 및 종류, 모델명:

-고령자용지팡이

(조절식:FS301,접이식:FS302)

2. 재질: 알루미늄, 합금, ABS

3. 규격 : 설명서 앞면에 표시

4. 최대하중:120Kg 이하

5. 제조연월: 2014.03

6. 제조원: 플렉시풋 리미티드(Flexyfoot Limited)/영국

7. 원산지(제조국): 영국

8. 수입판매원: (주)플렉스에버,

경기도 성남시분당구 분당로 263,35 굿모닝프라자 201호

www.flexyfoot.co.kr, 031-709-3622



flexyfoot

탄력있는 발걸음 “플렉시풋” !